


My eInserts™

Специальный Online ресурс для просмотра и персональной оптимизации инструкций к контрольным материалам.

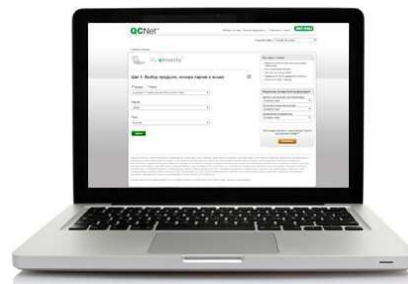


Благодарим Вас за приобретение контрольного материала Bio-Rad. Долгие годы наша компания является признанным лидером в производстве материалов и интеллектуальных решений для контроля качества лабораторных исследований. Надеемся, что Вы, как и многие другие наши клиенты, по достоинству оцените качество нашей продукции.

Заботясь об окружающей среде, компания **Bio-Rad Laboratories** приняла решение сократить потребление бумаги, в связи с этим, все материалы для внутрилабораторного контроля качества более не будут комплектоваться распечатанными инструкциями и вкладышами с аттестованными значениями.

Эта информация, как и прежде, будет доступна в сети Internet. Компания Bio-Rad предлагает широкий спектр Online сервисов по продукции для контроля качества, расположенных на сайте www.qcnet.com.

Среди прочего на сайте существует раздел My eInserts, посвящённый внутрилабораторным контролям, где Вы без труда сможете найти инструкции и аттестованные значения для всех актуальных лотов наших контрольных материалов.

Для того чтобы перейти в этот раздел откройте сайт www.qcnet.com и кликните по ссылке My eInserts в правом верхнем углу окна, как это показано на картинке ниже, или по прямой ссылке myeinserts.qcnet.com:

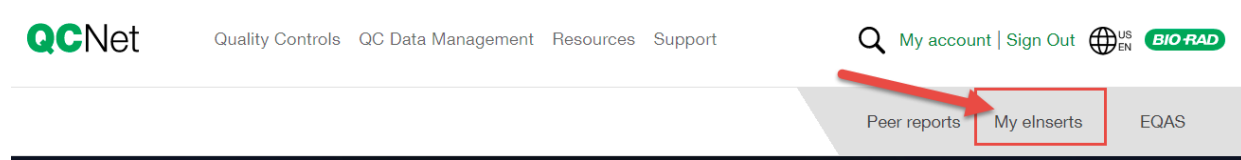

Открывшийся раздел русифицирован, и, если по умолчанию страница открылась не на русском языке, Вы можете выбрать его самостоятельно в правом верхнем углу страницы:

Войти в систему / Зарегистрироваться | Свяжитесь с нами 

Язык веб-сайта Русский (Russian) ▼

Также Вы можете найти руководство и видео-инструкцию по использованию раздела в правой части страницы. Для этого просто выберите язык интересующего пособия из выпадающего меню. Запрошенный материал откроется автоматически.

Получение справочной информации

Краткое руководство для начинающих
Выбрать язык ▼

Посмотреть видеоинструкции
Выбрать язык ▼

Руководства пользователя
Выбрать язык ▼

Для того чтобы просмотреть, скачать или распечатать интересующую Вас инструкцию или аттестованные значения выберите соответствующий продукт и номер партии (лота) из списка.

 My eInserts™

Шаг 1: Выбор продукта, номера партии и языка ?

☒ Продукт ☐ Поиск

Lyphocheck Assayed Chemistry Control (C-310-5) ▼ 

Партия

26480 ▼ 

Язык

Русский ▼

Далее

Существует несколько вариантов обозначений для номеров партий контрольных материалов:

Справка [**Заккрыть**]

12320*	Показывает вкладыши, которые не могут быть индивидуально настроены
12320 U *	Обновление для лота 12320
12330 V *	Штрих-коды для Siemens Dimension Vista 2D
12330 VU *	Обновление штрих-кодов для Siemens Dimension Vista 2D
12330 B *	Штрих-коды для Siemens Dimension Vista 2D
12330 BU *	Обновление штрих-кодов для Siemens Dimension Vista 2D

Поддержка & Часто задаваемые вопросы

Для получения соответствующих данных по выбранной партии контрольного материала нажмите **Получить полный вкладыш** или **Далее**, если имеется возможность индивидуальной настройки.

В первом случае начнётся загрузка файла, во втором откроется следующее окно, где Вам предложат произвести настройки в соответствии с Вашими требованиями:

Продукт: **Liquichek Homocysteine Control (287)**
Партия: **36870**
Язык: **Русский**

Шаг 2: Измените в соответствии с вашими требованиями My eInserts™

1 ☐ Добавить Инструкции по применению [Просмотреть и Напечатать](#)

2 **Выбрать единицы** ☐ Традиционные ☒ СИ ☐ Выбрать единицы для каждого элемента списка

3 **Выбрать из METHOD Таблица (выбрать несколько вариантов)**
Нажмите + для того, чтобы развернуть список

☐ Выбрать все

☒ ГОМОЦИСТЕИН

- ☐ Abbott Alinity i Analyzer - µmol/L
- ☐ Abbott Architect iSystems - µmol/L
- ☐ Beckman Coulter AU Systems (Axis-Shield Diagnostics) - µmol/L
- ☐ Beckman Coulter AU Systems (Diasyme) - µmol/L
- ☐ Beckman Coulter Synchron / UniCel DxС Series - µmol/L
- ☐ Equal Diagnostics / Catch Inc. - µmol/L
- ☐ Ortho Vitros Microtip Series (Enzymatic) (HCY2) - µmol/L

Здесь Вы сможете добавить к файлу инструкцию **1**, выбрать единицы измерения **2** и интересующие Вас аналиты **3**.

Вы также можете развернуть список анализаторов для каждого из аналитов и выбрать все или только интересующие.

Выбрать из METHOD Таблица (выбрать несколько вариантов)
Нажмите + для того, чтобы развернуть список

☒ Выбрать все

☒ ГОМОЦИСТЕИН

- ☒ Abbott Alinity i Analyzer - µmol/L
- ☐ Abbott Architect iSystems - µmol/L
- ☐ Beckman Coulter AU Systems (Axis-Shield Diagnostics) - µmol/L
- ☒ Beckman Coulter AU Systems (Diasyme) - µmol/L
- ☐ Beckman Coulter Synchron / UniCel DxС Series - µmol/L
- ☐ Equal Diagnostics / Catch Inc. - µmol/L
- ☐ Ortho Vitros Microtip Series (Enzymatic) (HCY2) - µmol/L
- ☒ Roche Hitachi Cobas cSystems / INTEGRA / Modular - µmol/L
- ☐ Roche Hitachi Cobas cSystems / INTEGRA / Modular (Diasyme) - µmol/L
- ☐ Siemens ADVIA Centaur CP - µmol/L
- ☐ Siemens ADVIA Centaur Systems - µmol/L

Затем, Вы можете сохранить внесённые изменения, для удобства просмотра этих данных для будущих партий контрольного материала, нажав кнопку

Сохранить выбранные


и посмотреть данные, кликнув по кнопке

Просмотр & Печать вкладки

. Загрузка файла начнётся автоматически.

Для получения возможности сохранения индивидуальной настройки данных, получения уведомлений о появлении сведений о новых партиях контрольных

материалов, пожалуйста, пройдите регистрацию кликнув по соответствующему пункту в правом верхнем углу страницы:

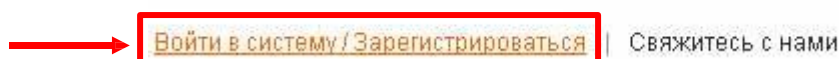

В зависимости от произведённых Вами настроек, загруженные русскоязычные файлы будут содержать (или не содержать) подробную инструкцию, перечень заявленных аналитов (определяемых параметров) и аттестованные значения по выбранным аналитам и анализаторам, методам или тест-системам.

BIO-RAD

Lymphocheck® Maternal Serum Control Levels 1, 2 and 3

REF 220 10ml 4 x 5 ml 2200 10ml 2 x 5 ml

CE 0103 IVD EXP 2015-01-31 LOT 39120 Level 1 2012 Level 2 2012 Level 3 2012

<http://www.myseris.com/39120>

ПРИМЕЧАНИЕ:
Продукт Lymphocheck Maternal Serum Control предназначен для использования в качестве контрольного образца для контроля качества и точности процедур лабораторных анализов, перечисленных в этой инструкции.
КРАЙНЕЕ ВАЖНО:
Важно для качества качества продукции для объективной оценки точности используемых методов и параметров, и не использование является обязательной частью надлежащей лабораторной практики. Пожалуйста, соблюдайте строгие инструкции, позволяющие достичь наивысшей точности аналитических систем.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Этот продукт изготовлен из дефибрилированной плазмы крови человека с добавлением химических веществ, компонентов человеческого происхождения и консервантов. Для повышения устойчивости этот продукт поставляется в вакуумированной таре.
ХРАНЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ:
Этот продукт сохраняет устойчивость до истечения срока годности при хранении в холодильнике при температуре от 2 до 8°C.
После вскрытия флакона при хранении в холодильнике срок годности при температуре от 2 до 8°C, этот продукт будет сохранять устойчивость как указано ниже:
- Без анализа: 10 дней
Продукт транспортируется с соблюдением следующих условий в условиях окружающей среды.
ПРОЦЕДУРА:
Обращаясь с этим продуктом следует таким же образом, как и с образцами, каплями и флаконами, содержащими, пожалуйста, использовать исключительно, комбинировать или разбавлять.
При анализе градуировочной кривой или по стандарту восстановить содержание каждого флакона 5,0 мл, дистрибуированный или дистрибуированный в виде. Закройте флакон пробкой и дайте этому продукту постоять примерно 15-20 минут, прежде чем использовать.
После вскрытия флакона продукт, этот продукт достигнет комнатной температуры (15-20°C). Встряхните флакон, чтобы убедиться, что содержимое флакона полностью перемешано. После каждого использования сразу же закройте флакон пробкой и поставьте туда, где он находится при температуре от 2 до 8°C.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТАБЛИЦ ДАННЫХ:
Выполняйте все указанные процедуры в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к этому продукту. Если требуется подтверждение, обращайтесь в местный отдел продаж Bio-Rad Laboratories или в службу технической поддержки Bio-Rad Laboratories.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
1. Не используйте этот продукт после истечения срока годности.
2. Если есть признаки множественного заражения или наблюдаются чрезмерные помехи в аналитическом продукте, необходимо выбросить флакон.
3. Этот продукт не предназначен для использования в качестве стандарта.

Страница 1

BIO-RAD Lymphocheck® Maternal Serum Control, Levels 1, 2 and 3

Дата внесения изменений: 2012-04-12 → Указывает измененную информацию

МЕТОД (Y)

Ссылка	Уровень 1 - 2012 (2)		Уровень 2 - 2012 (2)		Уровень 3 - 2012 (2)	
	Уровень	Диапазон	Уровень	Диапазон	Уровень	Диапазон
АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИН (AFP)						
Abbott ARCHITECT Systems	ng/mL	8,34 7,47 - 11,2	21,3 20,0 - 27,5	70,1 66,1 - 84,1		
Abbott ARCHITECT	ng/mL	8,79 7,92 - 10,5	26,1 22,5 - 28,7	88,8 86,1 - 89,8		
Abbott Laboratories	ng/mL	5	5	5		
Beckman Coulter Access 2 / 7 / 8	ng/mL	8,55 7,19 - 9,81	27,8 25,4 - 35,4	68,1 57,2 - 79,8		
Beckman Coulter UniCel Dxi	ng/mL	8,28 6,95 - 9,80	26,4 22,1 - 38,6	65,1 54,7 - 75,5		
Immunocheck Beckman Coulter Screen	ng/mL	10,2 8,25 - 12,4	33,5 28,9 - 38,1	79,9 66,2 - 85,6		
Immunocheck Beckman Coulter Screening BMM	ng/mL	10,6 8,32 - 12,9	37,0 29,8 - 44,2	85,5 70,2 - 121		
Immunocheck Beckman Coulter Screen CT	ng/mL	8,93 8,47 - 9,43	25,8 20,8 - 28,9	65,8 51,2 - 76,5		
Orion Vista HD	ng/mL	9,00 8,40 - 9,80	29,0 21,0 - 37,0	67,0 54,0 - 80,0		
Roche Elecsys 1170/5000 и Systeme	ng/mL	8,56 6,85 - 10,3	29,1 23,2 - 34,9	71,1 56,0 - 85,4		
Roche Elecsys Centaur CP (HPLC)	ng/mL	8,82 7,41 - 11,9	26,6 22,6 - 34,5	70,1 55,8 - 84,7		
Siemens ADVIA Centaur CP (HPLC)	ng/mL	9,38 7,22 - 11,5	28,9 22,8 - 34,9	70,6 55,8 - 85,5		
Siemens BMMx PT	ng/mL	7,77 6,32 - 9,23	28,0 22,4 - 33,6	70,3 56,7 - 84,3		
Siemens IMMULITE 2000/MP2000 +	ng/mL	7,21 5,77 - 8,88	26,3 21,3 - 35,6	67,8 54,3 - 81,4		
Wallac LIAISON XL/ELISA HPLC	ng/mL	8,99 7,19 - 11,9	29,0 23,0 - 35,0	70,0 56,0 - 86,0		
Wallac DELTA Xpress HPLC	ng/mL	9,99 7,20 - 11,9	29,0 23,0 - 35,0	72,0 58,0 - 88,0		
Zenith ELEVEN HPLC	ng/mL	7,77 5,89 - 9,45	33,0 23,1 - 42,9	70,7 53,7 - 89,7		
БЕТА-2-МИКРОГЛОБУЛИН (B2-MG)						
Abbott ARCHITECT Systems	mg/L	80,11 70,17 - 114,08	201,88 223,51 - 330,07	581,76 448,05 - 879,40		
Abbott ARCHITECT	mg/L	5	5	5		
Abbott Laboratories	mg/L	5	5	5		
Beckman Coulter Access 2 / 7 / 8	mg/L	88,02 74,10 - 109,45	209,17 240,02 - 337,82	590,14 477,24 - 830,44		
Beckman Coulter UniCel Dxi	mg/L	82,71 63,43 - 109,89	200,79 200,00 - 314,43	537,74 407,43 - 813,05		
Immunocheck Beckman Coulter Screen (Free Beta-HCG)	µg/L	70,11 58,7 - 81,6	>200	>200		
Immunocheck Beckman Coulter Screening RA (HCG)	µg/L	124,00 102,00 - 148,00	304,00 288,00 - 500,00	782,00 548,00 - 1050,00		
Immunocheck Beckman Coulter Screen RA (HCG)	µg/L	125,70 109,00 - 130,00	307,00 289,00 - 494,00	770,00 585,00 - 879,40		
Orion Vista HD (Total & Free HCG)	mg/L	148 111 - 180	407 307 - 607	809 770 - 1102		
Roche Elecsys 1170/511 (HCG 17-17)	mg/L	90,11 70,00 - 114,13	200,40 223,34 - 340,01	581,40 460,12 - 889,07		
Roche Elecsys 1170/511 (HCG 17-17) и Systeme (HCG + Beta)	mg/L	100,77 81,42 - 120,12	334,07 287,97 - 401,95	630,00 500,01 - 762,51		
Siemens ADVIA Centaur CP (HPLC HCG)	mg/L	71,00 55,00 - 88,00	210,00 180,00 - 300,00	480,00 300,00 - 710,00		
Siemens ADVIA Centaur CP (HPLC HCG) (numbered reagents)	mg/L	43,00 68,00 - 104,00	27,00 21,00 - 32,00	33,00 13,00 - 83,00		
Siemens ADVIA Centaur CP (HPLC HCG)	mg/L	79,40 61,10 - 95,70	217,00 210,00 - 320,00	487,00 400,00 - 586,00		
Siemens IMMULITE 2000/MP2000 +	mg/L	47,00 68,00 - 107,00	207,00 210,00 - 320,00	540,00 480,00 - 820,00		
Wallac LIAISON XL/ELISA HPLC	µg/L	102,78 122,02 - 180,03	322,79 49,83 - 827,00	911,89 732,00 - 1040,00		
Wallac DELTA Xpress (Free HCG-Beta)	µg/L	85,0 62,0 - 104	>200	>200		
Zenith ELEVEN TOTAL HCG	mg/L	90,40 63,00 - 117,00	327,00 291,00 - 420,00	870,00 477,00 - 870,00		
СТРОНИОЛ (STRONIOLOL)						
Abbott Laboratories	nmol/L	5	5	5		
Beckman Coulter Access 2 / 7 / 8	nmol/L	1,62 1,14 - 2,11	5,69 4,74 - 6,85	30,9 17,8 - 24,3		
Beckman Coulter UniCel Dxi	nmol/L	1,62 1,14 - 2,11	5,69 4,74 - 6,85	30,9 17,8 - 24,3		
Immunocheck Beckman Coulter RB	nmol/L	1,11 0,825 - 1,40	3,24 3,78 - 8,70	16,3 11,7 - 26,9		

Страница 1

В списке вместо числовых значений могут встречаться графические символы, обратите внимание на примечания:

ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Не все подстрочные примечания могут быть применимы для индивидуально выбранной вами таблицы данных.
 - (2) Перед проведением анализов, для которых приведенное в таблицах данных значение превышает самое высокое стандартное для анализа, необходимо сделать разведение.
- ▲ В настоящее время данные недоступны. Просим сделать запрос.
- § Данные, необходимые для определения средних и приемлемых диапазонов для этого анализа, не были получены из-за ограниченного количества участников в программе присвоения значений. Если ваше учреждение заинтересовано в участии в программе присвоения значений для этого анализа, просим обратиться в ваше местное отделение Bio-Rad.

От лица нашей дружной команды специалистов благодарим Вас за выбор продукции Bio-Rad Laboratories и желаем Вам успехов в Вашей работе.

105064, Москва, Нижний Сусальный пер, 5 стр 5А

тел.: (495) 721-14-04, факс: (495) 721-14-12

diag_support_rcis@bio-rad.com